

LANAFORM®



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim Lanaform Pulse Oxymeter S1 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSĐ trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt,
- Phiếu bảo hành sản phẩm.

1. Chức năng cơ bản:

- Thiết bị được sử dụng để đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và nhịp tim của bạn. Thiết bị hoạt động khi được kẹp vào đầu ngón tay, bạn có thể dùng ở nhà, cơ quan, hay bất cứ nơi đâu.
- Nồng độ oxy trong máu được coi là nguy hiểm nếu chỉ số dưới 90% cho nồng độ oxy trong máu động mạch. Giá trị bình thường là 100% trong điều kiện khí quyển bình thường.
- Lợi thế của máy đo nồng độ oxy trong máu LANAFORM oximeter S1 là nhỏ gọn, có mức tiêu thụ năng lượng thấp, dễ dàng để xử lý và thực hiện. Bằng cách đặt các ngón tay của bạn trong cảm biến quang điện, máy sẽ đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim cho bạn ngay lập tức.

2. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

- Không sử dụng thiết bị trong phòng chụp MRI.
- Để máy xa tầm tay trẻ em.
- Các phép đo phân tích bằng cách đo nồng độ oxy trong máu này không phải thay thế giám sát của y bác sĩ. Nó chỉ là một nguồn bổ sung thông tin sẽ được chuyển cho bác sĩ.
- Đặt thiết bị đúng cách để có kết quả đo chính xác nhất.
- Không sử dụng nước hay bất kì chất tẩy rửa có chứa clorua amoni, rượu hoặc các sản phẩm không được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này


- Hiệu năng của máy có thể bị suy giảm trong các trường hợp sau đây:
 - Ánh sáng quá mạnh
 - Xung yếu (dòng chảy yếu)
 - Tốc độ hemoglobin thấp
 - Ống thông động mạch
 - Sơn móng tay và / hoặc móng tay giả
 - Tại các bài kiểm tra đòi hỏi phải tiêm một loại thuốc nhuộm mạch
- Thiết bị có thể không chạy nếu bạn có lưu thông máu kém. chà xát ngón tay của bạn để tăng cường lưu thông hoặc đặt các thiết bị trên một ngón tay.
- Pin có thể rỉ nước hoặc phát nổ nếu không được sử dụng một cách chính xác hoặc được xử lý một cách mà không tuân thủ các quy định. Tháo pin ra nếu bạn không sử dụng thiết bị trong hơn 30 ngày.
- Không sử dụng thiết bị trong phòng có sử dụng bình xịt hoặc lượng oxy thấp
- Không sử dụng thiết bị bên ngoài quy định điều hành hoặc phạm vi lưu trữ
- Không sử dụng thiết bị trong hơn 30 phút mà không thay đổi ngón tay.
- Các thiết bị phải được sử dụng theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng các thiết bị trong vùng lân cận của điện từ trường lớn, chẳng hạn như dây hoặc điện thoại di động.

- Tuân thủ luật pháp địa phương tái chế khi xử lý thiết bị và các thành phần của nó, bao gồm cả pin.
- Luôn giữ thiết bị cách xa nguồn nhiệt như bếp, bộ tản nhiệt, vv
- Nếu có vấn đề với thiết bị của bạn, xin vui lòng liên hệ với đại lý bán lẻ của bạn.
- Không cố gắng để tự sửa chữa thiết bị của bạn
- Để xa tầm tay trẻ em, người hạn chế về khả năng thể chất, tâm thần hay những đối tượng chịu sự giám sát của người khác.
- Thiết bị này phải được sử dụng ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 5 ° C - 40 ° C.
- Không để thiết bị ở nhiệt độ trên 60 ° C hoặc dưới -20 ° C.
- Không sử dụng thiết bị nếu độ ẩm tương đối là trên 80% hoặc dưới 30%.

3. Cấu tạo thiết bị: Giao diện màn hình hiển thị của thiết bị có thể tự động xoay vòng bốn hướng theo hướng nhìn thiết bị của bạn.

CHỨC NĂNG

- Màn hình thể hiện 2 màu, bốn chế độ hiển thị.
- Tự động hiển thị theo hướng.
- Thời gian thực hình ảnh báo chức năng.
- Sự tiêu thụ ít điện năng. Có tác dụng trong 50 giờ liên tục.
- Truyền dịch thấp $\leq 0.4\%$.
- Chỉ báo mức pin
- Tự động tắt khi không có tín hiệu.
- Kích thước nhỏ và ít trọng lượng. Dễ dàng để vận chuyển.

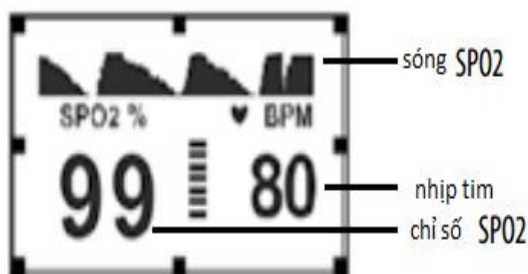

4. Hướng dẫn sử dụng

- Cài đặt pin

Lắp hai pin AAA , kiểm tra các cực được chính xác trước khi đóng nắp.



- Hướng dẫn sử dụng

1. Đặt ngón tay của bạn vào thiết bị với phần móng tay hướng lên trên, máy sẽ bắt đầu hoạt động và cho các thông số.Đề có kết quả tối ưu, xin vui lòng chắc chắn rằng ngón tay của bạn đặt đúng vị trí trung tâm máy



2. Không run, không di chuyển ngón tay khi máy hoạt động

3. Các giá trị tương ứng được hiển thị trên màn hình hiển thị.

+ Báo động pin yếu

Khi pin ở mức thấp nhất, là biểu tượng cho thấy pin cần sạc được hiển thị trên màn hình OLED.

+ Báo nhịp tim

Báo nhịp tim được kích hoạt theo mặc định khi nhịp tim cao hơn 110BPM hoặc thấp hơn 40BPM. Biểu tượng BPM nhấp nháy trên màn hình OLED. Nếu nồng độ oxy trong máu là dưới 85%, biểu tượng cũng nhấp nháy trên màn hình.

5. Bảo trì và bảo quản

- Sử dụng cotton dùng trong y tế để làm sạch phần cao su khi tiếp xúc với ngón tay của bạn bên trong thiết bị trước và sau khi sử dụng

- Làm sạch màn hình OLED bằng một miếng vải ẩm.

- Hãy tháo pin khi không sử dụng thiết bị .

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**